

OFTEXINE

Návod k použití:

Před aplikací si pečlivě přečtěte pokyny k použití a varování, abyste zdravotnický prostředek používali správně.

Oční kapky s provitaminem B5:

Oční kapky chrání oko proti podráždění, jako je pocit sucha v případě únavy a podráždění. Aplikujte pár kapek přímo do oka a diskomfort se zmírní nebo zcela ustane. Kapky jsou vhodné pro použití v kombinaci se všemi typy kontaktních čoček. Tyto oční kapky tvoří sterilní, viskózní a čirý hydratační a výživný roztok založený na provitaminu B5. Složka provitamin B5 podporuje a zlepšuje regenerační schopnost rohovky.

Aplikace:

Tyto hydratační oční kapky založené na provitaminu B5 zmírňují podráždění očí způsobené vnějšími vlivy, jako je okolní vzduch, tabákový kouř a pyl. Kapky lze nanést i na měkké nebo tvrdé kontaktní čočky před jejich zavedením.

Složení:

PHMB 0,0001%, PROVITAMIN B5 2%, HYDROXYMETHYL(PROPYL) CELULÓZA, CHLORID SODNÝ, EDTA, FOSFÁTOVÝ PUFŘ, ČIŠTĚNÁ VODA.

Bezpečnostní opatření a návod k použití:

Před použitím si umyjte a osušte ruce.

Nepoužívejte, pokud je ochranná pečeť před první aplikací porušena.

K porušení ochranné pečeti dojde, když odšroubujete víčko lahvičky.

Sejměte víčko z lahvičky a mírně zakloňte hlavu.

Držte oko otevřené pomocí palce a ukazováčku.

Opatrně do oka vymáčkněte jednu až dvě kapky a dvakrát nebo třikrát ho promrkněte.

Opakujte proces i u druhého oka.

Několikrát zamrkejte, aby kapky pokryly celý povrch očí.

Nedotýkejte se špičky kapátka lahvičky, mohlo by dojít ke kontaminaci roztoku.

Okamžitě po použití lahvičku pevně zavřete.

Podmínky pro skladování:

Spotřebujte do 2 měsíců od otevření.

Uchovávejte mimo dosah dětí (viz obrázek A).

Upozornění a kontraindikace:

Nepoužívejte kapky, pokud jste alergičtí na některou ze složek.

Nepoužívejte, pokud máte oční infekci.

Pokud se ihned po aplikaci podráždění zhorší nebo budete mít nepříjemné pocity, jako je bolest nebo pálení, ihned produkt přestaňte používat a obraťte se na svého lékaře.

Nepoužívejte v kombinaci s jinými léky na oči, dokud se neporadíte s očním specialistou nebo lékařem.

Nepoužívejte, pokud je obal poškozen (viz obrázek B).

Nepoužívejte po uplynutí data spotřeby.

Po aplikaci můžete nějakou dobu vidět rozmazaně.

Nepoužívejte více než 4x denně.

Pokud zaznamenáte vážný zdravotní problém v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem, přestaňte produkt používat a informujte zákonného výrobce a národní zdravotnické úřady.